

Patoloogiakeskuse uuringute nimistu

Valdkond	Nr.	Uuringu nimetus	Uuringumaterjali liik	Näidustused	Proovivõtu nõuded, proovivõtu anum	Uuringumaterjalide säilitamine (aeg, temperatuur) ja transport	Tervisekassa tervishoiuteenuse kood	Vastuse väljastamiseks kuluv aeg	Uuringumaterjali arhiveerimine	Uuringute tellimine	
Histopatoloogia	1.	Histoloogiline uuring	Operatsiooni materjal	Organi või koe haiguskahjustuse hindamine ja diagnoosimine	Fikseerida 10% puhverdatus formalinis suhtega 1:10. Fiksaator valada analüüsinosusse enne proovimaterjali anumasse asetamist. Saateanumaks kasutada ühekordseid formalinikindlaid suletavaid analüüsinosuid vastavalt materjali suurusele. Täpsem info proovi võtmise ja säilitamise kohta on toodud vastavate paikmete proovimaterjali võtmise tegevusjuhendites. 	Formaliinis fikseeritud uuringumaterjale säilitada toatemperatuuril. Transportida nõuetekohaselt märgistatud suletud saateanumates. Mitte märkida patsiendi andmeid saateanuma kaanele.	66801; vajadusel: 66802; 66805; 66804; 66834	Kuni 4 nädalat Pahaloomulise lõppdiagnoosi kinnitamine riikliku kvaliteedindikaatori järgselt kuni 20 kalendripäeva	Uuringumaterjali ülejääk säilitatakse märgarhiivs 1 kuu (vajadusel kauem). Parafiinplokiid 30 aastat; preparaadiklaasid 10 aastat.	Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas või pabersaatelehel koodiga S117	
				Organi või koe haiguskahjustuse hindamine ja diagnoosimine	Fikseerimata koelise materjal puhul kasutada ühekordseid suletavaid analüüsinosuid, vastavalt materjali suurusele. Täpsem info proovi võtmise ja säilitamise kohta on toodud vastavate paikmete proovimaterjali võtmise tegevusjuhendites. 	Fikseerimata koeline materjal saata koheselt patoloogiakeskuse uuringute vastuvõttu. Transportida nõuetekohaselt märgistatud suletud saateanumates. Mitte märkida patsiendi andmeid saateanuma kaanele.					
			Biopstaadid	Organi või koe haiguskahjustuse hindamine ja diagnoosimine	Fikseerida 10% puhverdatus formalinis suhtega 1:10. Fiksaator valatakse saateanumasse enne proovimaterjali anumasse asetamist. Proovianumaks kasutada ühekordseid formalinikindlaid keeratav korgiga analüüsitorpe. Täpsem info proovi võtmise ja säilitamise kohta on toodud vastavate paikmete proovimaterjali võtmise tegevusjuhendites. 	Säilitada toatemperatuuril. Võimalusel saata patoloogiakeskuse uuringute vastuvõttu sama tööpäeva jooksul. Transportida nõuetekohaselt märgistatud saateanumas. Mitte märkida patsiendi andmeid saateanuma kaanele.	66800; 66823; vajadusel: 66802; 66805; 66804; 66834	Kuni 2 nädalat Pahaloomulise lõppdiagnoosi kinnitamine riikliku kvaliteedindikaatori järgselt kuni 10 kalendripäeva	Erandi juhtudel säilitatakse uuringumaterjali ülejääk märgarhiivs 1 kuu (vajadusel kauem). Parafiinplokiid 30 aastat; preparaadiklaasid 10 aastat.	Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas või pabersaatelehel S117 .	
	2.	Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal	Fikseerimata koeline materjal	Organi või koe tehniline töötlus ja mikroskoopiline analüüsimine esmaseks haiguse morfoloogiliseks hindamiseks ja/või diagnoosimiseks operatsiooni ajal	Fikseerimata koelise materjali puhul kasutada ühekordseid suletavaid analüüsinosuid, vastavalt materjali suurusele. 	Saata koheselt patoloogiakeskuse uuringute vastuvõttu. Uuringumaterjal anda üle vastuvõtu töötajale (va torupostiga). Transportida nõuetekohaselt märgistatud suletud saateanumas. Mitte märkida patsiendi andmeid saateanuma kaanele.	66803	Ühe materjali puhul: kuni 30 minuti jooksul materjali üleandmise hetkest; Mitme materjali puhul võib aeg pikeneda maksimaalselt kuni 1 tunnini	Uuringumaterjali ülejääk säilitatakse märgarhiivs 1 kuu (vajadusel kauem). Parafiinplokiid 30 aastat; preparaadiklaasid 10 aastat.	Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas märkides ära lahtri "CITO" või pabersaatelehel S117 , märkides ära lahtri "Operatsiooniaegne kiiruuring". Kindlasti peab olema märgitud opereeriva kirurgi nimi ja telefoninumber.	
	3.	Lahang koos histoloogilise uuringuga	Toimida vastavalt juhendile Surmast teavitamine, surnu transportimine ja lahangule saatmine					66815; 66814 + 66801, 66802, 66804, 66805 ja 66817	Kuni 8 nädalat	Lahangu käigus võetud uuringumaterjali ülejääk säilitatakse märgarhiivs kuni lahangu vastuse väljastamiseni. Parafiinplokiid 30 aastat; preparaadiklaasid 10 aastat.	Tellimus esitada pabersaatelehel S024 ning toimida vastavalt juhendile Surmast teavitamine, surnu transportimine ja lahangule saatmine
	4.	Immunofluorentsents (DIF) uuring	Naha biopstaadid	Naha biopsia: villiline dermatosis, sidekoe haigused, vaskuliit.	Uuringumaterjal saata Michel's transportlahusega täidetud saateanumas. Vastava lahuse puudumisel asetada uuringumaterjal 0,9 % NaCl lahusega niisutatud lapi vahele, mis omakorda asetada suletavasse saateanumasse. Täpsem info proovi võtmise kohta on toodud juhendis Naha patoloogiliseks uuringuks proovimaterjali võtmine. 	NaCl lahuses naha biopstaadid saata laborisse 24h jooksul, võimalusel kohe ja säilitada külmkapis (+4 C°). Michel's transportlahuses säilivad materjalid toatemperatuuril 5 päeva. Transportida nõuetekohaselt märgistatud suletud saateanumas. Mitte märkida patsiendi andmeid saateanuma kaanele. Uuringumaterjal anda üle vastuvõtu töötajale (va torupostiga).	66713	Vastus koos põhiuuringuga kuni 3 nädalat	Külmplokiid säilitatakse 1 kuu. DIF preparaadiklaasid 2 kuud, HE preparaadiklaasid 10 aastat.	Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas või pabersaatelehel S117	
5.	Immunohistokeemiline või -tsütokeemiline uuring	Uuringumaterjalist valmistatud parafiinplokk või preparaadiklaas.	Koespetsiifiliste antigeenide määramine immuunreaktsiooniga rakus või raku pinnal	Parafiinplokk/preparaadiklaas peab olema identifitseeritav. Parafiinplokis peab olema säilinud uuringumaterjal.	Säilitada toatemperatuuril. Transportida suletud karbis.	66804; 66834	Vastus koos põhiuuringuga kuni 4 nädalat	Parafiinplokiid 30 aastat; preparaadiklaasid 10 aastat	Tellitakse jätkuuringuna patoloogi või raviarsti poolt elektroonselt "Tellimused" või "PIS" keskkonnas või pabersaatelehel P377 .		
6.	Tsütoploki uuring	FNAB (fine needle aspiration biopsy); kehavedelikud	Vastava organi või kehavedeliku patoloogia hindamine	Fikseerida 10% puhverdatus formalinis suhtega 1:10. Uuringumaterjal asetatakse katsutis olevasse fiksaatorisse. 	Säilitada toatemperatuuril. Transportida nõuetekohaselt märgistatud suletud saateanumas.	66813; vajadusel: 66802; 66805; 66804; 66834	Kuni 2 nädalat	Parafiinplokiid 30 aastat; preparaadiklaasid 10 aastat	Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas või pabersaatelehel S177		

Valdkond	Nr.	Uuringu nimetus	Uuringumaterjali liik	Näidustused	Proovivõtu nõuded, proovivõtu anum	Uuringumaterjalide säilitamine (aeg, temperatuur) ja transport	Tervisekassa tervishoiuteenuse kood	Vastuse väljastamiseks kuluv aeg	Uuringumaterjali arhiveerimine	Uuringute tellimine
Hematopatoloogia	1.	Hematopatoloogia tsütoloogiline uuring	Perifeerse vere ja luuüdi aspiratsiooni älgereparaadid, fragmendilise preparaadi, trepani puutepreparaadid.	Vereleomehaiguse kahtlus või kasvajalise protsessi leviku hindamine	Äge- ja puutepreparaadid kuivatada õhu käes. Luuüdi älgereparaat saadetakse koos perifeerse vere älgereparaatidega ja perifeerse vere analüüsi tulemustega. Erandjuhtudel kui kohene älgereparaadi valmistamine ei ole võimalik, panna luuüdi uuringumaterjal lilla korgiga EDTA katustisse. Täpsem info proovi võtmise kohta on toodud juhendis - Luuüdi uuringus proovimaterjali võtmise tegevusjuhend. 	Preparaadiklaasid säilitada toatemperatuuril, pakendada ja transportida eraldi histoloogilistest materjalidest, et vältida kokkupuudet formaliniga. Katsutis uuringumaterjal saata koheselt patoloogilise uuringute vastuvõttu. 	66205; 66204	5 tööpäeva	Preparaadiklaasid 30 aastat	Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas või pabersaatelehel S177
	2.	Hematopatoloogia histoloogiline uuring	Luuüdi kämp	Vereleomehaiguse kahtlus või kasvajalise protsessi leviku hindamine	Fikseerida 10% puhverdatud formalinis suhtega 1:10. Uuringumaterjal asetada katsutis või analüüsitopsis olevasse fiksaatorisse. Täpsem info proovi võtmise kohta on toodud juhendis - Luuüdi uuringus proovimaterjali võtmise tegevusjuhend. 	Säilitada toatemperatuuril. Transportida nõuetekohaselt märgistatud, suletud proovivõtu anumates.	66204; 66205; 66802; 66804; 66805; 66813	5 tööpäeva	Parafinplakid 30 aastat; preparaadiklaasid 10 aastat.	Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas või pabersaatelehel S117
			Luuüdi trepanbiopstaat	Vereleomehaiguse kahtlus või kasvajalise protsessi leviku hindamine	Fikseerida 10% puhverdatud formalinis suhtega 1:10. Uuringumaterjal asetada katsutis või analüüsitopsis olevasse fiksaatorisse. Täpsem info proovi võtmise kohta on toodud juhendis - Luuüdi uuringus proovimaterjali võtmise tegevusjuhend. 	Säilitada toatemperatuuril. Transportida nõuetekohaselt märgistatud, suletud roovivõtu anumates. Mitte märkida patsiendi andmeid saateanuma kaanele.	66802; 66805; 66804; 66810; 66823	2-3 nädalat		Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas või pabersaatelehel koodiga S117
	3.	Biopaatide ja lümfisõlmede tsütoloogiline ja histoloogiline kompleksuuring	Biopaatidid, lümfisõlmed jm. koeline materjal	Lümfoproliferatiivsete haiguste kahtlus	Fikseerimata uuringumaterjal panna 0,9% NaCl lahusega niisutatud lapi vahele ning seejärel asetada puhtasse suletavasse analüüsitopsi. Kui biopaat peaks olema rohkem kui üks, siis 1-2 tükk jätta fikseerimata ja ülejäänud tükkid fikseerida 10% puhverdatud formalinis suhtega 1:10. Fiksaator valatakse saateanumasse enne proovimaterjali anumasse asetamist. Proovianumaks kasutada ühekordseid formalinikindlaid keeratava korgiga analüüsitopse. Täpsem info proovi võtmise kohta on toodud juhendis Lümfisõlme või koelise materjali hematopatoloogiliseks uuringuks võtmine. 	Fikseerimata uuringumaterjal saata koheselt patoloogilise uuringute vastuvõttu. Erandjuhtudel ja kokkuleppel säilitada 5-13°C juures kuni 24 tundi. Formalinis materjal säilitada toatemperatuuril ning saata patoloogilise uuringute vastuvõtu koos sama uuringu fikseerimata materjaliga. Transportida nõuetekohaselt märgistatud saateanumates. Mitte märkida patsiendi andmeid saateanuma kaanele. Transportida nõuetekohaselt märgistatud, suletud saateanumates.	66810; 66813; 66823; 66800; 66801; 66802; 66804; 66805; 66834	Kuni 4 nädalat	Parafinplakid 30 aastat; preparaadiklaasid 10 aastat. Märgarhiiv 1 kuu (vajadusel rohkem)	Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas või pabersaatelehel S117 . Leppida kokku eelnevalt patoloogilise uuringute vastuvõtu kohta.

Valdkond	Nr.	Uuringu nimetus	Uuringumaterjali liik	Näidustused	Proovivõtu nõuded, proovivõtu anum	Uuringumaterjalide säilitamine (aeg, temperatuur) ja transport	Tervisekassa tervishoiuteenuse kood	Vastuse väljastamiseks kuluv aeg	Uuringumaterjali arhiveerimine	Uuringute tellimine
Tsütopatoloogia	1.	Günekotsütoloogiline uuring	Vedelikuühine günekotsütoloogiline materjal	Günekoloogiliste haiguste uurimine ja vähi sõeluuringud	Säilituslahusega eeltäidetud vedelikutsitoloogia (ThinPrep PAP test) proovitops. Täpsem info proovi võtmise kohta on toodud juhendis Günekotsütoloogiliseks uuringuks proovimaterjali võtmine. 	Proovimaterjal koguda säilituslahusega eeltäidetud vedelikutsitoloogia (LBC) topsi ja säilitada toatemperatuuril kuni laborisse saatmiseni. Lisauuringute jaoks säilitatakse proovimaterjaliga LBC proovianumat 4 nädalat (proovi võtmise ajast).	66822; 66821; 66820; 66804	Kuni 2 nädalat, keerulistel/erandjuhtudel kuni 3 nädalat	Preparaadiklaasid 30 aastat	Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas või pabersaatelehel S199
	2.	Üldtsütoloogiline uuring	Tsütoloogiline materjal (preparaadiklaasid)	Koe rakuliste muutuste hindamine	Fikseerimata preparaadiklaaside puhul lasta uuringumaterjaliga alusklasidel kuivada õhu käes. Fikseerimiseks asetada uuringumaterjaliga alusklasid koheselt 96% etanooli 30 minutiks, seejärel lasta kuivada õhu käes. Täpsem info proovi võtmise kohta on toodud juhendis Tsütopatoloogiliseks uuringuks proovimaterjali võtmine.	Preparaadiklaasid saata toatemperatuuril transpordikonteineris.	66810; 66819	Kuni 2 nädalat, keerulistel/erandjuhtudel kuni 3 nädalat	Preparaadiklaasid 30 aastat	
			Tsütoloogiline materjal (vedelikud)	Koe rakuliste muutuste hindamine	Keha- ja loputusvedelikud panna lilla korgiga EDTA katustisse või puhtasse keeratava korgiga lekketihedasse proovitopsi. Liikvor panna lisandita valge korgiga katustisse. Täpsem info proovi võtmise kohta on toodud juhendis Tsütopatoloogiliseks uuringuks proovimaterjali võtmine. 	Saata koheselt (30 minuti jooksul) laborisse. Erandjuhtudel säilitada materjali külmas 5-13°C juures 24 tundi; liikvort 1 tund toatemperatuuril, 3 tundi 5-13°C juures.	66810; 66812	Kuni 2 nädalat, keerulistel/erandjuhtudel kuni 3 nädalat	Preparaadiklaasid 30 aastat	Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas või pabersaatelehel S118

			BAL ehk bronhoalveolaarne lavaaživedelik	Kopsuhaiguste diagnoosimine	Uuringumaterjal panna steriilsesse proovivõtu anumasse ning asetada koheselt külmkappi 4°C juurde. Täpsem info proovi võtmise kohta on toodud juhendis Tsütopatoloogiliseks uuringuks proovimaterjali võtmine.  	Saata koheselt (30 minuti jooksul) keskuse üringute vastuvõttu. Transportida külmakastis temperatuuril 5±3°C.	5 tööpäeva	Preparaadiklaasid 30 aastat	
--	--	--	--	-----------------------------	--	---	------------	-----------------------------	--

Valdkond	Nr.	Uuringu nimetus	Uuringumaterjali liik	Näidustused	Proovivõtu nõuded, proovivõtu anum	Uuringumaterjalide säilitamine (aeg, temperatuur) ja transport	Tervisekassa tervishoiuteenuse kood	Vastuse väljastamiseks kuluv aeg	Uuringumaterjali arhiveerimine	Uuringute tellimine
Molekulaarpatoloogia	1.	Molekulaarne lisauuring FISH meetodil	Parafiinplokk	Lümfoomi spetsiifiliste muutuste määramine (t(8;14) IGH::MYC, MYC break, BCL2 break, BCL6 break, t(14;18) IGH::BCL2, t(11;14) IGH::CCND1, t(14;18) IGH::MALT1, t(11;18) BIRC3::MALT1). Sarkoomi spetsiifiliste muutuste määramine (MDM2 geeni amplifikatsioon, t(17;22) COL1A1::PDGFB, t(11;22) EWSR1::FLI1, EWSR1 break, SS18 break, USP6 break, FOXO1 break). Glooomide spetsiifiliste muutuste määramine (CDKN2A deletsioon). Vajadusel prediktivsete markerite (HER2, ROS1) tulemuse kinnitamine.	Parafiinplokk peab olema identifitseeritav. Parafiinplokis peab olema säilinud uuringumaterjal.	Säilitada toatemperatuuril. Transportida suletud karbis.	66635; 66637; 66639	Kuni 2 nädalat	Preparaadiklaasid säilitatakse 2 kuud	Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas või "PIS" keskkonnas või pabersaatelehel S395 (prediktivsete markerite puhul P377)
			Puutepreparaat	Lümfoomi spetsiifiliste muutuste määramine (t(8;14) IGH::MYC, MYC break, BCL2 break, BCL6 break, t(14;18) IGH::BCL2, t(11;14) IGH::CCND1, t(14;18) IGH::MALT1, t(11;18) BIRC3::MALT1).	Puutepreparaat valmistada tavalisele alusklasile ja lasta õhu käes kuivada.	Säilitada toatemperatuuril. Transportida transpordikonteineris. 	66638	Kuni 2 nädalat	Preparaadiklaasid säilitatakse 2 kuud	Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas või "PIS" keskkonnas või pabersaatelehel S395
			Luuüdi	Lümfoomi spetsiifiliste muutuste määramine t(14;18) IGH::BCL2, t(11;14) IGH::CCND1 Hulgimüeloomi prognostiliste markerite määramine esmasel analüüsil: t(4;14) IGH::FGFR3, t(11;14) IGH::CCND1, t(14;16) IGH::MAF, IGH break, del(17p13) TP53, del(1p32)/amp(1q21), trisoomiad (5-, 9-, 15. kromosoom), lisaks vajadusel: t(6;14) IGH::CCND3, t(14;20) IGH::MAFB; kordus analüüsil: del(17p13) TP53, del(1p32)/amp(1q21)	Luuüdi puhul võtta proovimaterjaliks esimene või teine tõmme. Uuringumaterjal panna hepariniseeritud katsupõlde (roheline korgiga) 	Koheselt saata patoloogilise uuringute vastuvõttu. Transportimiseni säilitada 4-8" juures. Transportida nõuetekohaselt märgistatud suletud proovivõtu anum.	66638	Kuni 2 nädalat	Preparaadiklaasid säilitatakse 2 kuud	Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas või "PIS" keskkonnas või pabersaatelehel S395
	2.	Molekulaarne lisauuring CISH meetodil	Parafiinplokk	Epstein-Barr viiruse (EBER Epstein-Barr Virus Early RNA), Kappa ja lambda (immuunglobuliini kergete ahelate mRNA) määramine	Parafiinplokk peab olema identifitseeritav. Parafiinplokis peab olema säilinud uuringumaterjal.	Säilitada toatemperatuuril. Transportida suletud karbis.	66806	Kuni 2 nädalat	Preparaadiklaasid 10 aastat	Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas või pabersaatelehel S394
	3.	Molekulaarne lisauuring PCR meetodil	Parafiinplokk	Kasvaja spetsiifiliste mutatsioonide määramine järgnevates geenides: EGFR, KRAS, NRAS, BRAF ja MSI staatuse määramine. ALK, ROS1, RET geenifusioonide ja MET 14 eksoni vahelejätmise määramine.	Parafiinplokk peab olema identifitseeritav. Parafiinplokis peab olema säilinud uuringumaterjal.	Säilitada toatemperatuuril. Transportida suletud karbis.	66610	Kuni 2 nädalat	Uuringumaterjali ei säilitata	Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas või pabersaatelehel S393
			Veri (vereplasma)	Kasvaja spetsiifiliste mutatsioonide määramine EGFR geenis ctDNAs (circulating tumor DNA)	K2 EDTA katsuti (lilla korgiga) 10 ml	Veri saata koheselt labori pereanalüütikasse. Preenalüütikas koheselt tsentrifuugida ja eraldada plasma. Verest tuleb plasma eraldada 4 tunni jooksul. Plasma säilitada -80°C külmkapis	66610	Kuni 2 nädalat	Uuringumaterjali ei säilitata	Tellimus esitada elektroonselt "Tellimused" keskkonnas või pabersaatelehel S393

Valdkond	Nr.	Uuringu nimetus	Uuringumaterjali liik	Näidustused	Proovivõtu nõuded, proovivõtu anum	Uuringumaterjalide säilitamine (aeg, temperatuur) ja transport	Tervisekassa tervishoiuteenuse kood	Vastuse väljastamiseks kuluv aeg	Uuringumaterjali arhiveerimine	Uuringute tellimine
	1.	Konsultatsioonimaterjalide tellimine teistest raviasutusest, teisease arvamus väljastamine	Eelnevalt vastatud uuringute preparaadiklaasid/ parafiinplokid koos molekulaarsete lisauuringute vastustega	Teisease arvamus saamine	Erinõuded puuduvad	Säilitada toatemperatuuril. Preparaadiklaasid transportida transpordikonteineris.	3004u, lisauuringute korral Tervisekassa hinnakirja põhisel	Kuni 4 nädalat	Uuringumaterjalid tagastatakse saatjale	Taotlus preparaatide tellimiseks saata e-postile sekretar.patoloogia@regionaalhaigla.ee Saadetakse koos esialgse otsusega (vastusega).

Konsultatsioonid ja lisauuringud	2.	Uuringumaterjalide tellimine ja saatmine väliskonsultatsiooniks	Eelnevalt vastatud uuringute preparaadiklaasid/ paraflinplakid	Teise arvamuse saamine väljastpoolt patoloogilise keskusest	Erinõuded puuduvad	Säilitada toatemperatuuril. Preparaadiklaasid transportida transpordikonteineris.	3004u, lisauuringute korral Tervisekassa hinnakirja põhise	Ooteaeg 1-3 kuud	Patsient/tema esindaja või raviarst vastutavad materjali tagastamise eest patoloogilise keskusele	Patsiendi või tema esindaja poolt vormistatakse tellimus PERH kanteleis. Raviarsti poolt esitatakse tellimus taotluse P268. Täidetud taotlus saata PERH kanteleisse või patoloogilise keskuse e-postile sekretar.patoloogia@regionaalhaigla.ee
	3.	Ühiskonsiliumi otsuse/teise arvamuse tellimine keskuse sisese	Eelnevalt vastatud uuringute preparaadiklaasid/ paraflinplakid	Ühisotsuse tegemine/teise arvamuse saamine	Erinõuded puuduvad	Säilitada toatemperatuuril. Preparaadiklaasid transportida transpordikonteineris.	3004u, lisauuringute korral Tervisekassa hinnakirja põhise	Kuni 2 nädalat	Paraflinplakid 30 aastat; preparaadiklaasid 10 aastat.	Tellimus saata patoloogilise keskuse e-postile sekretar.patoloogia@regionaalhaigla.ee
	4.	Uuringumaterjali väljatellimine teadusuuringuks	Eelnevalt vastatud uuringute preparaadiklaasid/ paraflinplakid	Uuringute tellimine väljastpoolt patoloogilise keskuse teadusuuringu eesmärgil	Erinõuded puuduvad	Säilitada toatemperatuuril. Preparaadiklaasid transportida transpordikonteineris.	Hind kokkuleppele lähtuvalt Tervisekassa hinnakirjast	1-3 tööpäeva	Uuringumaterjalid tagastada patoloogilise keskusele	Tellimus saata patoloogilise keskuse e-postile sekretar.patoloogia@regionaalhaigla.ee
	5.	Uuringumaterjali võtmine/ saatmine ainult teadusuuringuks	Fikseerimata või fikseeritud koeline materjal	Uuringute tellimine teadusuuringu eesmärgil	Eelnevalt vastatud materjalid (sise- ja väljasttellimused), spetsiaalselt võetud uuringumaterjalid	Säilitamine vastavalt nõuetele; toatemperatuuril või vedelas lammastikus	Hind kokkuleppele lähtuvalt Tervisekassa hinnakirjast	1-5 tööpäeva	Uuringumaterjalid arhiveerib tellija vastavalt seadusele	Tellimused kooskõlastada patoloogilise keskuse juhatajaga

Koostaja: Evelin Tomingas-Oppi, labori juht, 617 1057

Juhendid: Ravi ja uuringud Valdikond: Patoloogia uuringud; Alavaldikond: Patoloogia uuringute tellimine; Märksõnad: nimistu; patoloogia uuringud

Muudatused: uuendatud tervisekassa tervishoiuteenuste koodi, lisatud viited proovivõtu tegevusjuhenditele.